



MANI Shine

WHITENING OFFICE SET

MADE IN GERMANY



MANI

MANIShine – der Whitening Experte für erstklassige Ergebnisse und lächelnde Patienten! Zweikomponenten-Bleaching-Gel in einer Automix-Kartusche mit 35 % Wasserstoffperoxid für die effektive Aufhellung einzelner oder mehrerer Zähne, einschließlich endodontisch behandelter Zähne.

Enthalten sind auch der Premium Gingiva Guard und die Remineralisierungspaste Remin Care.

INDIKATIONEN

- ▼ Aufhellung von verfärbten, devitalisierten Zähnen
- ▼ Aufhellung von Zähnen, die aufgrund von Krankheiten, Traumata oder iatrogenen Ursachen verfärbt sind, als Alternative zu Kronen oder Veneers
- ▼ Behandlung von medikamentös bedingten Zahnverfärbungen

PRODUKTMERKMALE

- ▼ Neutraler pH-Wert
 - ▼ **Schnelle und zuverlässige Aufhellung**
 - ▼ Langanhaltende Ergebnisse
 - ▼ Schonend für die Zähne
 - ▼ Einfache Anwendung ohne Nachlaufen
 - ▼ Kein Mischen erforderlich, was eine homogene Qualität gewährleistet
 - ▼ **Sicherer Transport und garantierte Materialstabilität dank der Sicherheitsklammer**
- 

STEP BY STEP

1 VORBEREITUNG

Zahnfarbe bestimmen (Vergleich mit Vita®-Farbskala). Zähne gründlich reinigen (Air-Flow oder Reinigungspaste). Wangen-/Lippenhalter einsetzen und Gingivaschutz anbringen.



Aufbringung des MANISHine Gingiva Guard.
Ein Schutz für das Zahnfleisch.

2 BLEICHGEL AUFTRAGEN

Spritze vorbereiten (Verschlusskappe entfernen, Mischkanüle anbringen). Gel ausgeben, bis es homogen ist. Gleichmäßig 1–2 mm dick auf die zu bleichenden Flächen auftragen.



3 EINWIRKZEIT & VERSTÄRKUNG

Active White 35% Gel für 10 Minuten einwirken lassen. Optional: Lichtverstärkung mit Plasma-Licht oder Laser (Augenschutz beachten). Falls nötig, Behandlung bis zu dreimal wiederholen.



4 NACH DER BEHANDLUNG

Gel absaugen und gründlich abspülen. Oberfläche trocknen und mit Polierpaste polieren. Nachbehandlung mit MANISHine Remin Care. Mindestens 1 Stunde nach der Behandlung nichts essen, trinken oder rauchen. Stark färbende Lebensmittel einige Tage meiden.



Nach der Behandlung den Guard abmachen
und die MANISHine Remin Care verwenden.

MANIShine Active White 35% IM VERGLEICH

BLEACHING

	MANIShine	Wettbewerber 1	Wettbewerber 2
Konzentration Wasserstoffperoxid (gemischt)	35%	38%	29%
pH-Wert (gemischt)	7,3	8,0	7,4
Farbe	Rot	Rot	Blau
Mit Zusatz zur Remineralisierung	Ja	Ja	Nein
Mit Zusatz zur Schmerzreduzierung	Ja	Ja	Ja
Darreichung	Doppelkartusche (Automix)	Zwei Spritzen, Handmischung erforderlich	Doppelkartusche (Automix)
Spezielle Features	Spezialklammer (bessere Stabilität, keine Blasen)	Nein	Nein
Konsistenz: Gel (einfaches Handling, hohe Sicherheit)	Ja	Ja	Nein



VORHER



NACHHER

PHYSIKALISCHE DATEN*

MANIShine Gingiva Guard

Härte	Dichte	farbe
4,5 HV	1,28 g/cm ³	blau

* Alle technischen Daten sind Mittelwerte und können in jeder Liefercharge leicht variieren.

1

Schutz des Zahnfleisches mit

MANIShine
Gingiva Guard



eIFU ↑

2

Anwendung von

MANIShine
Active White 35%



eIFU ↑

3

Behandlung abschließen mit

MANIShine
Remin Care



eIFU ↑

Inhalt

MANIShine Gingiva Guard, 1,5 g

MANIShine Active White, contains hydrogen peroxide 35%, 5 g

MANIShine Remin Care, 2 ml

3 Mixing Tips

3 Application Tips



MANI MEDICAL GERMANY GmbH

Hertha-Sponer-Straße 2

61191 Rosbach v.d. Höhe

www.mani-germany.com

MANI